
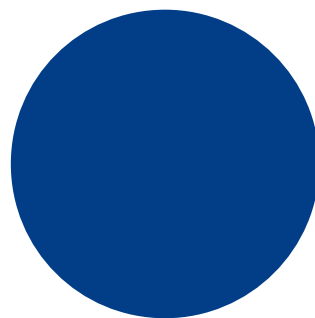
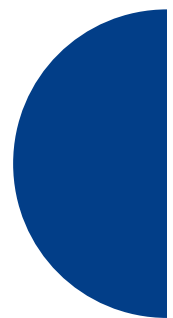


::: Bones

Milestone 112

Manual

www.bones.ch

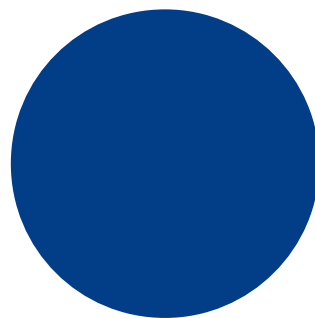

Indhold

1. Produktbeskrivelse	1
1.1. Gennemgang af enheden	1
1.1.1. Fronten	1
1.1.2. Toppen	1
1.1.3. Bunden	2
1.2. Tilslutningsmuligheder	2
1.2.1. Opladning af batteri	2
1.2.2. Høretelefon	2
1.2.3. Tilslutning til computer - Backup	2
1.2.4. Line-in tilslutning for ekstern lydkilde	2
2. Generelle funktioner	3
2.1. Tænd / Sluk (dvaletilstand)	3
2.2. Tastaturlås	3
2.3. Lydstyrke	3
2.4. Information	3
3. Optagelse	4
3.1. Optag en kort meddelelse	4
3.2. Optag en lang meddelelse	4
3.3. Vælg position for optagelse	4
3.4. Lyt til dine optagelser	4
3.5. Slet en optagelse	4
3.6. Valgfrie mapper	5
3.6.1. Aktiver mappestruktur	5
3.6.2. Mappenavigering	5
3.7. Optag fra ekstern lydenhed	5
4. Genveje	6
5. Generel information	7
5.1. Tekniske data:	7
5.2. Konfigurering	7
5.3. Beskyt din Milestone 112	7
5.4. Fejlfinding – Milestone fungerer ikke	8
5.5. Service og support	8
5.5.1. Generelle informationer	8
5.5.2. Firmware opdatering	8
5.6. Bones	8


Tillykke med din nye Milestone 112! Denne lille enhed og sørger for at du altid har dine optagelser med dig. Med denne vejledning lærer du om Milestone og hvordan du bruger den.

God fornøjelse.

1. Produktbeskrivelse

I dette kapitel behandles Milestone 112's knapper, forbindelser og generel brug.

1.1. Gennemgang af enheden

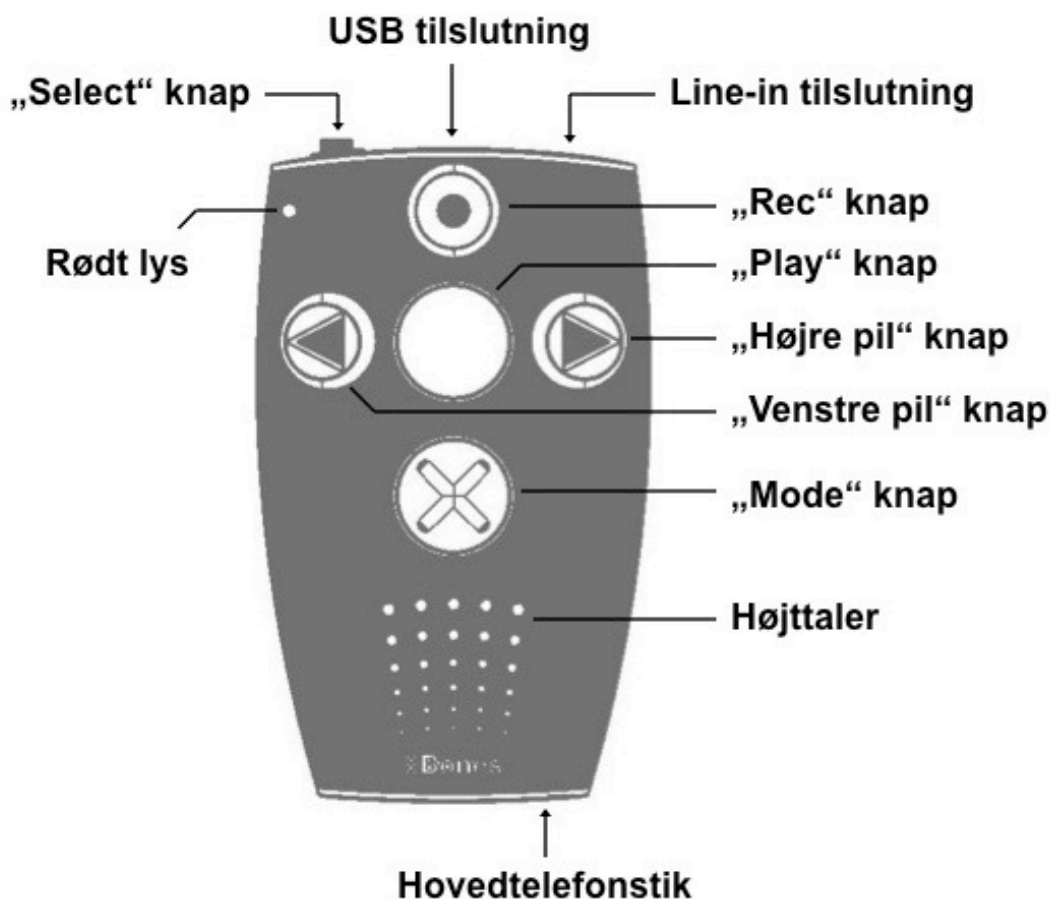

1.1.1. Fronten

Hold din Milestone 112 foran dig. Du finder fem knapper på fronten – en stor rund knap placeret i midten af enheden, samt fire andre knapper placeret rundt om denne. Den fordybte runde knap i midten er den eneste med en glat overflade. Dette er Play-knappen. Direkte under Play-knappen finder du Mode-knappen. Denne knap er markeret med et taktilt X. Over Play-knappen er Rec-knappen. Denne knap er markeret med en taktil fordybet cirkel. Til venstre for Play-knappen har du Venstre Pil-knappen. Du kan genkende den ved den taktile pil der peger mod venstre. Til højre fra Play-knappen findes Højre Pil-knappen. Denne er markeret med en taktile pil mod højre. Under knapperne kan du mærke højtaleren, og i venstre hjørne øverst er der placeret en lysdiode.

1.1.2. Toppen

På toppen af enheden finder du Milestone 112's sidste trykknop. Det er en smal rund knap placeret i venstre side. Det er Select-knappen. Lige til højre for Select-knappen finder du en åbning – det er USB porten. Ved overførsel af data til eller fra computeren samt ved

opladning, benytter du denne port til USB-kablet. Helt til højre op toppen af enheden er der en lille line-in port.

1.1.3. Bunden

Nederst på Milestone 112 finder du høretelefonstikket.

1.2. Tilslutningsmuligheder

Det følgende afsnit beskriver din Milestone 112's tilslutningsmuligheder.

1.2.1. Opladning af batteri

Forbind den medfølgende oplader til et strømstik. Du oplader din Milestone 112 ved at forbinde opladeren fra strømstikket til USB-indgangen i enheden. Et bip fra enheden indikerer, at enheden oplader. Lys-indikatoren øverst i venstre hjørne begynder at blinke. Den maksimale opladningstid for et fuldt opladet batteri er 3 timer. Bemærk at forbindelsen til computeren også oplader batteriet, så længe computeren er tændt. Du kan få information omkring batteritilstand via "Information" (se eventuelt afsnittet "Information").

1.2.2. Høretelefon

Hvis du ønsker at benytte høretelefon til aflytning, skal du tilslutte disse i bunden af enheden. Milestone 112 benytter almindelige høretelefoner. Lyden vil automatisk gå fra højttaleren i enheden til dine høretelefoner.

1.2.3. Tilslutning til computer - Backup

Tilslut via USB din Milestone 112 til en computer for at tage backup. USB-tilslutningen giver dig en hurtig overførsel af dine data. Det lille USB stik sættes i toppen af enheden, og det store stik sættes i din computer. Ved korrekt tilslutning annoncerer Milestone 112 "Opkobling aktiveret". Enheden vises på din computer som et drev med navnet "M112". Efter overførsel af dine data, fjern venligst opkoblingen korrekt ved "Sikker fjernelse af hardware og udskubning af medier". Milestone vil efter fjernelse af USB-kablet annoncere "Opkobling deaktiveret".

1.2.4. Line-in tilslutning for ekstern lydkilde

Line-in porten til højre for USB-porten kan benyttes til at optage fra eksterne lydkilder, som for eksempel en CD afspiller, en radio eller lignende. Du forbinder line-in porten med høretelefonstikket eller line-out porten på den eksterne enhed. Forbindelsen skal bestå af et stereo lydkabel. Den ene ende af kablet skal have et 3.5 mm stereo stik, hvor den anden ende afhænger af den tilsluttede enhed. Det kan eventuelt være høretelefonstikket. For mere information, se afsnittet om "Optagelse fra ekstern enhed".

2. Generelle funktioner

2.1. Tænd / Sluk (dvaletilstand)

Milestone 112 har ingen fysisk tænd/sluk knap. For at starte enheden skal du trykke på Play-knappen. Hvis du undlader at bruge enheden i 10 minutter, vil den automatisk gå i dvaletilstand for at spare batteriet. Din Milestone 112 vil vågne op igen ved at trykke på Play-knappen. Efter opvågning vil enheden starte hvor den stoppede.

TIP: Hvis din Milestone 112 ikke reagerer når du trykker på Play-knappen, er der tre muligheder du skal tjekke: Tastaturet er låst, lysstyrken er på sit laveste eller batteriet er tomt.

2.2. Tastaturlås

For at låse tastaturet, tryk og hold på Mode-knappen mens du hurtigt trykker på Rec-knappen, og derefter slipper dit hold på Mode-knappen. Når tastaturet er låst vil Milestone 112 annoncere "tastatur låst". Når tastaturet er låst vil alle tryk blive ignoreret, på nær genvejen til at låse tastaturet op igen. For at låse tastaturet op, gentag ovenstående vejledning. Enheden vil annoncere "tastatur aktivt", når tastaturet er låst op.

2.3. Lydstyrke

Milestone 112 har 16 lydstyrke indstillinger. For at øge lydstyrken, tryk og hold Mode-knappen nede og tryk én gang på Højre Pil-knap. For at mindske lydstyrken, tryk og hold Mode-knappen nede og tryk én gang på Venstre Pil-knap. Hvis du ønsker at ændre lydstyrken drastisk, tryk og hold Mode-knappen mens Højre- eller Venstre Pil-knap trykkes ned kontinuerligt.

Hvis du ændrer lydstyrken under afspilning, vil du kun høre at lydstyrken mindskes eller øges.

Hvis du ændrer lydstyrken under pause fra afspilningen, vil Milestone 112 annoncere "Lydstyrke ned" eller "Lydstyrke op". Når du maksimal lydstyrke vil Milestone 112 informere dig ved et bip.

2.4. Information

Trykker og holder du Mode-knappen nede i mindst 1,5 sekunder starter du "Information". Du vil modtage følgende informationer:

- Antal af optagelser og i tilfælde af mapper er aktiveret, lokaliteten
- Hukommelses status
- Batteri status
- Serienummer
- Firmware version

For at stoppe "Information", tryk én gang på Select-knappen eller vent til Information er færdig-oplæst.

3. Optagelse

Milestone 112 giver dig mulighed for at optage beskeder med den indbyggede mikrofon. Brug den til at indtale huskeliste, to-do liste, optage interviews eller samtaler, telefonnumre og så videre. Den indbyggede mikrofon er optimeret til tale og filtrerer baggrundslyde væk. Alle optagelser gemmes som MP3 filer med en kvalitet på 64 kbps.

3.1. Optag en kort meddelelse

For at optage en kort meddelelse, tryk og hold Rec-knappen nede ved indtaling. Et kort klik indikerer at optagelsen startes. For at stoppe optagelse, slip Rec-knappen igen. Det bedste resultat opnås ved at tale i normalt stemmeleje og ved at have enheden i en afstand på cirka 10 centimeter fra din mund. Den indbyggede mikrofon er placeret øverst i venstre hjørne, tæt på lysindikatoren.

3.2. Optag en lang meddelelse

Som et alternativ til at trykke og holde Rec-knappen nede, kan du starte en kontinuerlig optagelse. Tryk og hold Rec-knappen nede og tryk, når du hører det korte klik, på Play-knappen. Din enhed vil registrere starten af en lang optagelse ved en "dyb-høj" tone. For at stoppe optagelsen skal du blot trykke på Rec-knappen. Enheden vil registrere afslutningen af optagelsen med en "høj-dyb" tone. Hvis du ønsker at pause optagelsen kan du benytte Play-knappen. Tryk på Play-knappen for at starte optagelsen igen.

3.3. Vælg position for optagelse

Før du optager en meddelelse kan du vælge en destination for optagelsen. Brug henholdsvis Højre- og Venstre Pil-knap for at navigere gennem dine optagelser. Milestone 112 gemmer din nye optagelse bag sidst afspillede besked.

3.4. Lyt til dine optagelser

For at lytte til en optagelse skal du trykke på Play-knappen efter optagelse. For at pause aflytningen, tryk igen på Play-knappen.

Hvis du har flere optagelser kan du benytte henholdsvis Højre- og Venstre Pil-knap for at vælge den ønskede fil.

Tip: Du har muligheden for at springe til den første eller sidste optagelse. Tryk og hold Højre Pil-knap nede efterfulgt af Play-knappen for at springe til den sidste fil, og tryk og hold Venstre Pil-knap nede efterfulgt af Play-knappen for at springe til den første fil.

3.5. Slet en optagelse

Med Milestone 112 kan du fjerne optagelser direkte uden brug af computer. Afspil optagelsen som du ønsker fjernet. Mens afspilningen foretages, tryk og hold Mode-knappen og tryk kort på Play-knappen. Optagelsen vil blive fjernet når du slipper knapperne.

3.6. Valgfrie mapper

For at kunne gøre Milestone 112 så enkel som overhovedet muligt er den præinstalleret med kun én mappe. Hvis du ønsker det, kan i alt fem mapper blive aktiveret. Disse mapper kan benyttes til at have struktur i dine optagelser. For eksempel kan du bruge en mappe til telefonnumre, en anden til indkøbslister og så videre.

3.6.1. Aktiver mappestruktur

Der er to måder at åbne for de ekstra mapper. Du kan aktivere mapperne i filen "CONFIG MILESTONE.TXT" når du forbinder din Milestone 112 til din computer. Information herom finder du i afsnittet "Konfigurering". Du kan også anvende følgende vejledning:

Aktiver tasturlås og tryk og hold herefter Select-knappen. Tryk og hold desuden begge Pil-knapperne. Hold alle tre knapper nede i mindst 10 sekunder og Milestone 112 vil annoncere aktiveringen.

3.6.2. Mappenavigering

Hver enkelt knap på fronten af din Milestone er linket til en specifik mappe. For at vælge en mappe skal du trykke og holde Select-knappen, og en af de fem knapper på forsiden. Når du slipper knapperne, hopper du automatisk ind i den valgte mappe. For eksempel ved at benytte kombinationen Select-knappen og Mode-knappen, hopper du automatisk ind i mappe 5. Select-knappen og Højre Pil-knappen fører dig til mappe 4 og så videre.

3.7. Optag fra ekstern lydenhed

Foruden at kunne optage meddelelser via den integrerede mikrofon, kan du med Milestone 112 optage fra eksterne lydenheder. Forbind derfor din Milestone 112 med den eksterne lydenhed som beskrevet i "Line-in tilslutning for ekstern lydkilde". Milestone 112 skifter automatisk fra den integrerede mikrofon til den eksterne enhed når tilslutningen via Line-in sker. Processen er den samme som ved brug af den interne mikrofon: korte optagelser udføres ved at trykke på Rec-knappen og kontinuerlige optagelser ved kombinationen Rec-knappen plus Play-knappen. Milestone 112 optager igennem line-in i MP3 i en kvalitet på 128 kbps.

Tip: Hvis optagelserne bliver forvrænget, skal du mindske lydstyrken på den eksterne enhed.

Tip: Mens du optager gennem en ekstern enhed, kan du følge med i afspilningen gennem høretelefoner.

4. Genveje

Funktion	Udførelse	Milestone feedback
Start Milestone	Play-knap	“Opstartslyd”
Øg lydstyrke	Mode-knap + Højre-knap	”Lydstyrke op” (i pause mode)
Mindske lydstyrke	Mode-knap + Venstre-knap	”Lydstyrke ned” (i pause mode)
Tastatur lås/lås op	Mode-knap + Rec-knap	“Tastatur låst” samt “Tastatur aktivt”
Start Information	Mode-knap i 1,5 sekunder	Information starter
Kort optagelse	Rec-knap (tryk og hold)	“Klik”
Start kontinuerlig optagelse	Rec-knap + Play-knap	“Dyb-høj” tonesignal
Pause start/slut ved lang optagelse	Play-knap (under kontinuerlig optagelse)	Kort “bip”
Afslut kontinuerlig optagelse	Rec-knap	“Høj-dyb” tonesignal
Afspil eller pause optagelse	Play-knap	-
Afspil næste optagelse	Højre Pil-knap	-
Afspil forrige optagelse	Venstre Pil-knap	-
Spring til første optagelse	Højre Pil-knap + Play-knap	-
Spring til sidste optagelse	Venstre Pil-knap + Play-knap	-
Slet optagelse	Mode-knap + Play-knap	Slettesignal
Spring mellem mapper	Select-knap + angivende knap på fronten	Mappenavn

5. Generel information

5.1. Tekniske data:

- Optage kapacitet: 25 timer
- Bit rate optagelse ved brug af indbygget mikrofon: 64 kbps.
- Sampling rate: 32 kHz.
- Sample resolution: 16 bit.
- USB 2.0 Hi-Speed forbindelse.
- Høretelefon stik: 3.5 mm.
- Line-in stik: 3.5 mm.
- Slagfast plastic-kabinet.
- Mål: 85 x 54 x 14 mm, vægt: 49 gram.
- Indbygget genopladeligt lithium polymer batteri.
- Maksimal optagelse ved én opladning: 15 timer.
- Maksimal opladetid: 3 timer.

5.2. Konfigurering

På Milestone 112's interne hukommelse finder du en fil med navnet "CONFIG MILESTONE.TXT". Denne fil kan du benytte til at ændre konfigurationen af din enhed. Filen kan åbnes og ændres med et tekst-program, for eksempel WordPad. Ændringerne du kan foretage er som følger:

Aktiver slukke-signal:

Find linjen "enable_feature offsound". Udskift "0" med en værdi mellem 1 og 200. For eksempel 30 – Milestone 112 vil herefter afspille et kort signal 30 sekunder før enheden slukker. Værdien "0" deaktiverer signalet.

Aktiver mappe struktur:

Find linjen "folders". Udskift "no" med "yes" og de fem mapper til fordeling af dine optagelser aktiveres.

Aktiver mappenavne:

Find linjen "folder_names". Ændre "no" til "yes" og muligheden for at omdøbe mapperne bliver tilgængeligt. Du omdøber en mappe på følgende måde: Tryk og hold Rec-knappen og efter den lille klik-lyd, tryk og hold Mode-knappen. Hold begge knapper nede og start din indtaling på navnet af din mappe efter "dyb-høj" tonen. Du afslutter optagelsen ved at slippe knapperne. Dette registreres af signalet "høj-dyb" tone.

Forøgelse af systemmeddelelser:

Find linjen "prompt_speed". Ændre "100" med en værdi op til 150. Denne ændring gør oplæsningen af systemmeddelelser i menuen hurtigere. For eksempel, hvis du ændre værdien til 150, så stiger hastigheden til 150 procent.

Gem og luk altid filen efter ændringerne. Husk at fjerne Milestone 112 fra computeren med brug af "Sikker fjernelse af hardware og udskubning af medier".

5.3. Beskyt din Milestone 112

Beskyt din Milestone 112 fra mekanisk overlast, fugt og fra direkte kontakt med vand. Ved uhensigtsmæssig behandling af enheden bortfalder al garanti. Undlad at forsøge på selv at reparere enheden, uden nærmere aftale med forhandleren.

5.4. Fejlfinding – Milestone fungerer ikke

Trin 1:

Er enheden fuldt opladet? Oplad batteriet i mindst en halv time. Tryk herefter på Play-knappen i mindst et halvt sekund. Hvis enheden stadig ikke reagerer, gå til trin 2.

Trin 2:

Er tastaturet låst? For at låse tastaturet op skal du trykke og holde Mode-knappen, og tryk herefter på Rec-knappen.

- Hører du “tastatur aktiveret” kan du igen benytte din Milestone. Tastaturet var låst.
- Hører du “tastatur låst” er dit tastatur låst. Forsøg samme kombination igen for at låse dit tastatur op.
- Hvis din enhed ikke reagerer, gå til trin 3.

Trin 3:

Din enhed fungerer ikke korrekt hvis den på nuværende tidspunkt ikke har reageret. Tryk på samtlige knapper på fronten af enheden, på nær Play-knappen. Dette nulstiller enheden. Hvis dette stadig ikke afhjælper problemet, kan du forsøge at reinstallere firmwaren eller kontakte din forhandler.

5.5. Service og support

5.5.1. Generelle informationer

Service og support foregår gennem din forhandler – det vil sige der hvor du købte din Milestone 112. Din forhandler kender produktet og vil være behjælpelige med dine problemer eller betjeningen. Du kan tilmed besøge www.bones.ch for mere information omkring Milestone 112.

5.5.2. Firmware opdatering

Hvis du ønsker at opgradere din Milestone 112 med den nyeste firmware har du to muligheder. Du kan enten kontakte din forhandler som kan hjælpe dig eller du kan gøre det selv via internettet. Disse tre trin hjælper dig med installationen:

- Tjek din firmware version på din Milestone 112. Tryk og hold Mode-knappen nede i mindst 1,5 sekunder, og Information starter. Din Milestone 112 vil annoncere firmware versionen til sidst.
- Tjek hvilken firmware version der er den nyeste. Åben din internet browser og besøg www.bones.ch. Under Support finder du Milestone 112, hvor du også finder den nyeste firmware. Hvis den nye firmware har et højere nummer end den på din Milestone skal du downloade og gemme den på din computer.
- Kopier herefter den nye firmware til din Milestone 112. Forbind din enhed til computeren og åben drevet ”M112”. Kopier den downloadede fil til roden af drevet. Fjern forbindelsen mellem din Milestone 112 og din computer. Herefter vil din enhed annoncere ”Softwareopdatering under udførelse. Vent venligst i 30 sekunder”.

5.6. Bones

For mere information omkring Milestone familien, besøg www.bones.ch eller kontakt din forhandler.