

::Bones

Milestone 112 Ace

Manual

www.bones.ch



FW2 HMI nr. 74323


Contents

1. Produktbeskrivelse	3
1.1. Gennemgang af enheden	3
1.1.1. Fronten	3
1.1.2. Toppen	3
1.1.3. Bunden	4
1.2. Tilslutningsmuligheder	4
1.2.1. Opladning af batteri	4
1.2.2. Høretelefon	4
1.2.3. Tilslutning til computer - Backup	4
1.2.4. Line-in tilslutning for ekstern lydkilde	4
2. Generelle funktioner	4
2.1. Tænd / Sluk (dvaletilstand)	4
2.2. Tastaturlås	5
2.3. Lydstyrke	5
2.4. Information	5
3. Optagelse	5
3.1. Optag en kort meddelelse	5
3.2. Optag en lang meddelelse	6
3.3. Vælg position for optagelse	6
3.4. Lyt til dine optagelser	6
3.5. Slet en optagelse	6
3.6. Valgfrie mapper	6
3.6.1. Aktiver mappestruktur	6
3.6.2. Mappenavigering	6
3.7. Optag fra ekstern lydenhed	7
4. Genveje	7
5. Ur	8
5.1. Hvad er klokken?	8
5.2. Indstil klokken	8
6. Generel information	8
6.1. Tekniske data:	8
6.2. Konfigurering	8
6.3. Beskyt din Milestone 112 Ace	9
6.4. Fejlfinding – Milestone fungerer ikke	9
6.5. Service og support	10
6.5.1. Generelle informationer	10
6.5.2. Firmware opdatering	10
6.6. Bones	10

1. Produktbeskrivelse

I dette kapitel behandles Milestone 112 Ace's knapper, forbindelser og generel brug.

1.1. Gennemgang af enheden

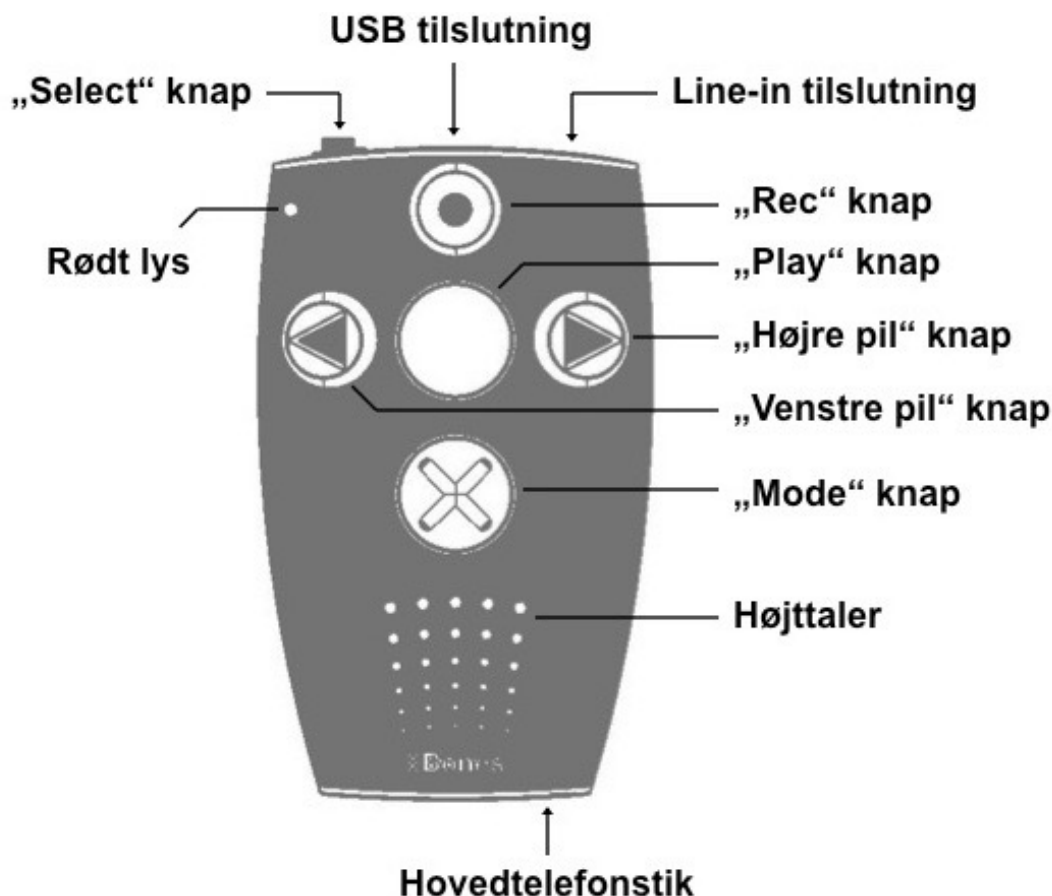

1.1.1. Fronten

Hold din Milestone 112 Ace foran dig. Du finder fem knapper på fronten – en stor rund knap placeret i midten af enheden, samt fire andre knapper placeret rundt om denne. Den fordybende runde knap i midten er den eneste med en glat overflade. Dette er Play- knappen. Direkte under Play-knappen finder du Mode-knappen. Denne knap er markeret med et taktilt X. Over Play-knappen er Rec-knappen. Denne knap er markeret med en taktil fordybet cirkel. Til venstre for Play-knappen har du Venstre Pil-knappen. Du kan genkende den ved den taktile pil der peger mod venstre. Til højre fra Play-knappen findes Højre Pil-knappen. Denne er markeret med en taktil pil mod højre.

Under knapperne kan du mærke højttaleren, og i venstre hjørne øverst er der placeret en lysdiode.

1.1.2. Toppen

På toppen af enheden finder du Milestone 112 Ace's sidste trykknop. Det er en smal rund knap placeret i venstre side. Det er Select-knappen. Lige til højre for Select-knappen finder du en åbning – det er USB porten. Ved overførsel af data til eller fra computeren samt ved opladning, benytter du denne port til USB-kablet. Helt til højre op toppen af enheden er der en lille line-in port.

1.1.3. Bunden

Nederst på Milestone 112 Ace finder du høretelefonstikket.

1.2. Tilslutningsmuligheder

Det følgende afsnit beskriver din Milestone 112 Ace's tilslutningsmuligheder.

1.2.1. Opladning af batteri

Forbind den medfølgende oplader til et strømstik. Du oplader din Milestone 112 Ace ved at forbinde opladeren fra strømstikket til USB-indgangen i enheden. Et bip fra enheden indikerer, at enheden oplader. Lys-indikatoren øverst i venstre hjørne begynder at blinke. Den maksimale opladningstid for et fuldt opladet batteri er 3 timer. Bemærk at forbindelsen til computeren også oplader batteriet, så længe computeren er tændt. Du kan få information omkring batteritilstand via "Information" (se eventuelt afsnittet "Information").

1.2.2. Høretelefon

Hvis du ønsker at benytte høretelefon til aflytning, skal du tilslutte disse i bunden af enheden. Milestone 112 Ace benytter almindelige høretelefoner. Lyden vil automatisk gå fra højttaleren i enheden til dine høretelefoner.

1.2.3. Tilslutning til computer - Backup

Tilslut via USB din Milestone 112 Ace til en computer for at tage backup. USB-tilslutningen giver dig en hurtig overførsel af dine data. Det lille USB stik sættes i toppen af enheden, og det store stik sættes i din computer. Ved korrekt tilslutning annoncerer Milestone 112 Ace "Opkobling aktiveret". Enheden vises på din computer som et drev med navnet "M112 Ace". Efter overførsel af dine data, fjern venligst opkoblingen korrekt ved "Sikker fjernelse af hardware og udskubning af medier". Milestone vil efter fjernelse af USB-kablet annoncere "Opkobling deaktiveret".

1.2.4. Line-in tilslutning for ekstern lydkilde

Line-in porten til højre for USB-porten kan benyttes til at optage fra eksterne lydkilder, som for eksempel en CD afspiller, en radio eller lignende. Du forbinder line-in porten med høretelefonstikket eller line-out porten på den eksterne enhed. Forbindelsen skal bestå af et stereo lydkabel. Den ene ende af kablet skal have et 3.5 mm stereo stik, hvor den anden ende afhænger af den tilsluttede enhed. Det kan eventuelt være høretelefonstikket. For mere information, se afsnittet om "Optagelse fra ekstern enhed".

2. Generelle funktioner

2.1. Tænd / Sluk (dvaletilstand)

Milestone 112 Ace har ingen fysisk tænd/sluk knap. Milestone 112 Ace kan vækkes op fra strømsparetilstand med enhver tast på forsiden. Hvis du undlader at bruge enheden i 10 minutter, vil den automatisk gå i dvaletilstand for at spare batteriet. Din Milestone 112 vil vågne op igen ved at trykke på Play-knappen. Efter opvågning vil enheden starte hvor den stoppede.

TIP: Hvis din Milestone 112 Ace ikke reagerer når du trykker på Play-knappen, er der tre muligheder du skal tjekke: Tastaturet er låst, lysstyrken er på sit laveste eller batteriet er tomt.

2.2. Tastaturlås

For at låse tastaturet, tryk og hold på Mode-knappen mens du hurtigt trykker på Rec- knappen, og derefter slipper dit hold på Mode-knappen. Når tastaturet er låst vil Milestone 112 Ace annoncere "tastatur låst". Når tastaturet er låst vil alle tryk blive ignoreret, på nær genvejen til at låste tastaturet op igen. For at låse tastaturet op, gentag ovenstående vejledning. Enheden vil annoncere "tastatur aktivet", når tastaturet er låst op.

2.3. Lydstyrke

Milestone 112 Ace har 16 lydstyrke indstillinger. For at øge lydstyrken, tryk og hold Mode-knappen nede og tryk én gang på Højre Pil-knap. For at mindske lydstyrken, tryk og hold Mode-knappen nede og tryk én gang på Venstre Pil-knap. Hvis du ønsker at ændre lydstyrken drastisk, tryk og hold Mode-knappen mens Højre- eller Venstre Pil-knap trykkes ned kontinuerligt.

Hvis du ændrer lydstyrken under afspilning, vil du kun høre at lydstyrken mindskes eller øges. Hvis du ændrer lydstyrken under pause fra afspilningen, vil Milestone 112 Ace annoncere "Lydstyrke ned" eller "Lydstyrke op". Når du maksimal lydstyrke vil Milestone 112 Ace informere dig ved et bip.

Tip: Lydstyrken kan nu ændres for både højttaler og hovedtelefoner individuelt. Milestone 112 Ace husker automatisk dine indstillinger for lydstyrke.

2.4. Information

Trykker og holder du Mode-knappen nede i mindst 1,5 sekunder starter du "Information". Du vil modtage følgende informationer:

- Antal af optagelser og i tilfælde af mapper er aktiveret, lokaliteten • Hukommelses status
- Batteri status
- Serienummer
- Firmware version

For at stoppe "Information", tryk én gang på Select-knappen eller vent til Information er færdig-oplæst.

3. Optagelse

Milestone 112 Ace giver dig mulighed for at optage beskeder med den indbyggede mikrofon. Brug den til at indtale huskeliste, to-do liste, optage interviews eller samtaler, telefonnumre og så videre. Den indbyggede mikrofon er optimeret til tale og filtrerer baggrundslyde væk. Alle optagelser gemmes som MP3 filer med en kvalitet på 64 kbps.

3.1. Optag en kort meddelelse

For at optage en kort meddelelse, tryk og hold Rec-knappen nede ved indtaling. Et kort klik indikerer at optagelsen startes. For at stoppe optagelse, slip Rec-knappen igen. Det bedste resultat opnås ved at tale i normalt stemmeleje og ved at have enheden i en afstand på cirka 10 centimeter fra din mund. Den indbyggede mikrofon er placeret øverst i venstre hjørne, tæt på lysindikatoren.

Tip: Med Milestone 112 Ace er det muligt at starte en optagelse øjeblikkeligt. Det er ligegyldigt om enheden allerede er tændt eller i strømsparetilstand. Tryk og hold blot på REC tasten indtil du

hører et klik signal. Bibehold tasten nede og lav optagelsen, som starter automatisk efter klikket. Slip REC tasten når du er færdig med optagelsen.

3.2. Optag en lang meddelelse

Som et alternativ til at trykke og holde Rec-knappen nede, kan du starte en kontinuerlig optagelse. Tryk og hold Rec-knappen nede og tryk, når du hører det korte klik, på Play- knappen. Din enhed vil registrere starten af en lang optagelse ved en ”dyb-høj” tone. For at stoppe optagelsen skal du blot trykke på Rec-knappen. Enheden vil registrere afslutningen af optagelsen med en ”høj-dyb” tone. Hvis du ønsker at pause optagelsen kan du benytte Play-knappen. Tryk på Play-knappen for at starte optagelsen igen.

3.3. Vælg position for optagelse

Før du optager en meddelelse kan du vælge en destination for optagelsen. Brug henholdsvis Højre- og Venstre Pil-knap for at navigere gennem dine optagelser. Milestone 112 Ace gemmer din nye optagelse bag sidst afspillede besked.

3.4. Lyt til dine optagelser

For at lytte til en optagelse skal du trykke på Play-knappen efter optagelse. For at pause aflytningen, tryk igen på Play-knappen.

Hvis du har flere optagelser kan du benytte henholdsvis Højre- og Venstre Pil-knap for at vælge den ønskede fil.

Tip: Du har muligheden for at springe til den første eller sidste optagelse. Tryk og hold Højre Pil-knap nede efterfulgt af Play-knappen for at springe til den sidste fil, og tryk og hold Venstre Pil-knap nede efterfulgt af Play-knappen for at springe til den første fil.

3.5. Slet en optagelse

Med Milestone 112 Ace kan du fjerne optagelser direkte uden brug af computer. Afspil optagelsen som du ønsker fjernet. Mens afspilningen foretages, tryk og hold Mode- knappen og tryk kort på Play-knappen. Optagelsen vil blive fjernet når du slipper knapperne.

3.6. Valgfrie mapper

For at kunne gøre Milestone 112 Ace så enkel som overhovedet muligt er den præinstalleret med kun én mappe. Hvis du ønsker det, kan i alt fem mapper blive aktiveret. Disse mapper kan benyttes til at have struktur i dine optagelser. For eksempel kan du bruge en mappe til telefonnumre, en anden til indkøbslister og så videre.

3.6.1. Aktiver mappestruktur

Der er to måder at åbne for de ekstra mapper. Du kan aktivere mapperne i filen “CONFIG MILESTONE.TXT” når du forbinder din Milestone 112 Ace til din computer. Information herom finder du i afsnittet “Konfigurering”. Du kan også anvende følgende vejledning: Aktiver tastaturlåse og tryk og hold herefter Select-knappen. Tryk og hold desuden begge Pil-knapperne. Hold alle tre knapper nede i mindst 10 sekunder og Milestone 112 Ace vil annoncere aktiveringen.

3.6.2. Mappenavigering

Hver enkelt knap på fronten af din Milestone er linket til en specifik mappe. For at vælge en mappe skal du trykke og holde Select-knappen, og en af de fem knapper på forsiden. Når du slipper knapperne, hopper du automatisk ind i den valgte mappe. For eksempel ved at benytte kombinationen Select-knappen og Mode-knappen, hopper du automatisk ind i mappe 5. Select-knappen og Højre Pil-knappen fører dig til mappe 4 og så videre.

3.7. Optag fra ekstern lydenhed

Foruden at kunne optage meddelser via den integrerede mikrofon, kan du med Milestone 112 Ace optage fra eksterne lydenheder. Forbind derfor din Milestone 112 Ace med den eksterne lydenhed som beskrevet i "Line-in tilslutning for ekstern lydkilde". Milestone 112 Ace skifter automatisk fra den integrerede mikrofon til den eksterne enhed når tilslutningen via Line-in sker. Processen er den samme som ved brug af den interne mikrofon: korte optagelser udføres ved at trykke på Rec-knappen og kontinuerlige optagelser ved kombinationen Rec-knappen plus Play-knappen. Milestone 112 Ace optager gennem line- in i MP3 i en kvalitet på 128kbps.

Tip: Hvis optagelserne bliver forvrænget, skal du mindske lydstyrken på den eksterne enhed.

Tip: Mens du optager gennem en ekstern enhed, kan du følge med i afspilningen gennem høretelefoner.

4. Genveje

Funktion	Udførelse	Milestone feedback
Start Milestone	Enhver tast	"Opstartsl lyd"
Øg lydstyrke	Mode-knap + Højre-knap	"Lydstyrke op" (i pause mode)
Mindske lydstyrke	Mode-knap + Venstre- knap	"Lydstyrke ned" (i pause mode)
Tastatur lås/lås op	Mode-knap + Rec-knap	"Tastatur låst" samt "Tastatur aktivt"
Start Information	Mode-knap i 1,5 sekunder	Information starter
Kort optagelse	Rec-knap (tryk og hold)	"Klik"
Start kontinuerlig optagelse	Rec-knap + Play-knap	"Dyb-høj" tonesignal
Pause start/slut ved lang optagelse	Play-knap (under kontinuerlig optagelse)	Kort "bip"
Afslut kontinuerlig optagelse	Rec-knap	"Høj-dyb" tonesignal
Afspil eller pause optagelse	Play-knap	-
Afspil næste optagelse	Højre Pil-knap	-
Afspil forrige optagelse	Venstre Pil-knap	-
Spring til første optagelse	Højre Pil-knap + Play- knap	-
Spring til sidste optagelse	Venstre Pil-knap + Play- knap	-
Slet optagelse	Mode-knap + Play-knap	Slettesignal
Spring mellem mapper	Select-knap + angivende knap på fronten	Mappenavn

5. Ur

Dette afsnit beskriver hvordan du benytter urfunktionen. Uret er en funktion som du kan bestille sammen med din Milestone 112 Ace eller senere hen. Hvis din Milestone 112 Ace ikke har denne urfunktion og du skulle ønske at bestille den, kontakt venligst din forhandler.

5.1. Hvad er klokken?

For at høre klokken, tryk og hold SELECT tasten i et stykke tid, og slip den herefter. Tiden hvor du skal holde SELECT tasten nede er nem at huske. Sig blot ordet "Milestone" langsomt og stille i hovedet. Dét er omtrent så længe tasten skal holdes nede. Ved at gøre ovenstående vil, ved slip på SELECT tasten, Milestone 112 Ace annoncere tydeligt det aktuelle klokkeslæt i timer og minutter.

Tiden du er nødt til at holde SELECT tasten nede er vigtigt for at undgå unødige annoncering af tiden, når du vil skifte mappe.

5.2. Indstil klokken

For at indstille klokkeslæt, tryk og hold SELECT tasten i mindst seks sekunder. Efterfølgende annoncerer din Milestone 112 Ace "Indstil timen", efterfulgt af det aktuelle indtastede klokkeslæt. Nu kan du ændre timeantal ved at benytte VENSTRE PIL og HØJRE PIL. Med VENSTRE PILE tast reducerer du time for time, mens du med HØJRE PILE tast øger timeantallet. Efter hver ændring vil Milestone 112 Ace annoncere det nye klokkeslæt. Når du er færdig med at indstille timerne, tryk på PLAY tasten for at bevæge dig videre til minutter. Nu kan du indstille minutter på samme måde som du indstillede timer. Når du er færdig med minutterne, tryk på PLAY tasten igen. Du er hermed færdig med at indstille klokkeslæt, og din Milestone 112 Ace vil annoncere klokken for dig.

6. Generel information

6.1. Tekniske data:

- Optage kapacitet: 80 timer
- Internet hukommelse: 2,5 GB
- Bit rate optagelse ved brug af indbygget mikrofon: 64 kbps
- Bit rate optagelse ved brug af ekstern mikrofon: 128 kbps
- Sampling rate: 44.1 kHz.
- Sample resolution: 16 bit.
- USB 2.0 Hi-Speed forbindelse.
- Høretelefon stik: 3.5 mm.
- Line-in stik: 3.5 mm.
- Slagfast plastic-kabinet.
- Mål:85x54x14mm,vægt:49gram.
- Indbygget genopladeligt lithium polymer batteri.
- Maksimal optagelse ved én opladning: 20 timer.
- Maksimal opladetid: 3 timer.

6.2. Konfigurering

På Milestone 112 Ace's interne hukommelse finder du en fil med navnet "CONFIG MILESTONE.TXT". Denne fil kan du benytte til at ændre konfigurationen af din enhed. Filen kan åbnes og ændres med et tekst-program, for eksempel WordPad. Ændringerne du kan foretage er som følger:

Aktiver slukke-signal:

Find linjen "enable_feature offsound". Udskift "0" med en værdi mellem 1 og 200. For eksempel 30 – Milestone 112 Ace vil herefter afspille et kort signal 30 sekunder før enheden slukker. Værdien "0" deaktiverer signalet.

Aktiver mappe struktur:

Find linjen "folders". Udskift "no" med "yes" og de fem mapper til fordeling af dine optagelser aktiveres.

Aktiver mappenavn:

Find linjen "folder_names". Ændre "no" til "yes" og muligheden for at omdøbe mapperne bliver tilgængeligt. Du omdøber en mappe på følgende måde: Tryk og hold Rec-knappen og efter den lille klik-lyd, tryk og hold Mode-knappen. Hold begge knapper nede og start din indtaling på navnet af din mappe efter "dyb-høj" tonen. Du afslutter optagelsen ved at slippe knapperne. Dette registreres af signalet "høj-dyb" tone.

Forøgelse af systemmeddelelser:

Find linjen "prompt_speed". Ændre "100" med en værdi op til 150. Denne ændring gør oplæsningen af systemmeddelelser i menuen hurtigere. For eksempel, hvis du ændre værdien til 150, så stiger hastigheden til 150 procent.

Gem og luk altid filen efter ændringerne. Husk at fjerne Milestone 112 Ace fra computeren med brug af "Sikker fjernelse af hardware og udskubning af medier".

6.3. Beskyt din Milestone 112 Ace

Beskyt din Milestone 112 fra mekanisk overlast, fugt og fra direkte kontakt med vand. Ved uhensigtsmæssig behandling af enheden bortfalder al garanti. Undlad at forsøge på selv at reparere enheden, uden nærmere aftale med forhandleren.

6.4. Fejlfinding – Milestone fungerer ikke

Trin 1:

Er enheden fuldt opladet? Oplad batteriet i mindst en halv time. Tryk herefter på Play- knappen i mindst et halvt sekund. Hvis enheden stadig ikke reagerer, gå til trin 2.

Trin 2:

Er tastaturet låst? For at låse tastaturet op skal du trykke og holde Mode-knappen, og tryk herefter på Rec-knappen.

- Hører du "tastatur aktiveret" kan du igen benytte din Milestone. Tastaturet var låst.
- Hører du "tastatur låst" er dit tastatur låst. Forsøg samme kombination igen for at låse dit tastatur op.
- Hvis din enhed ikke reagerer, gå til trin 3.

Trin 3:

Din enhed fungerer ikke korrekt hvis den på nuværende tidspunkt ikke har reageret. Tryk på samtlige knapper på fronten af enheden, på nær Play-knappen. Dette nulstiller enheden. Hvis dette stadig ikke afhjælper problemet, kan du forsøge at reinstallere firmware eller kontakte din forhandler.

6.5. Service og support

6.5.1. Generelle informationer

Service og support foregår gennem din forhandler – det vil sige der hvor du købte din Milestone 112. Din forhandler kender produktet og vil være behjælpelige med dine problemer eller betjeningen. Du kan tilmed besøge www.bones.ch for mere information omkring Milestone 112.

6.5.2. Firmware opdatering

Hvis du ønsker at opgradere din Milestone 112 med den nyeste firmware har du to muligheder. Du kan enten kontakte din forhandler som kan hjælpe dig eller du kan gøre det selv via internettet. Disse tre trin hjælper dig med installationen:

- Tjek din firmware version på din Milestone 112. Tryk og hold Mode-knappen nede i mindst 1,5 sekunder, og Information starter. Din Milestone 112 vil annoncere firmware versionen til sidst.
- Tjek hvilken firmware version der er den nyeste. Åben din internet browser og besøg www.bones.ch. Under Support finder du Milestone 112 Ace, hvor du også finder den nyeste firmware. Hvis den nye firmware har et højere nummer end den på din Milestone skal du downloade og gemme den på din computer.
- Kopier herefter den nye firmware til din Milestone 112 Ace. Forbind din enhed til computeren og åben drevet "M112". Kopier den downloadede fil til roden af drevet. Fjern forbindelsen mellem din Milestone 112 Ace og din computer. Herefter vil din enhed annoncere "Softwareopdatering under udførelse. Vent venligst i 30 sekunder".

6.6. Bones

For mere information omkring Milestone familien, besøg www.bones.ch eller kontakt din forhandler.

