

## Lathund Milestone 112 Ace




## Innehållsförteckning

<b>Knappbeskrivning</b>	<b>3</b>
Bild och knappbeskrivning.	3
Ovansidan	3
Övre kortsidan	3
Nederkant	4
<b>Allmänt</b>	<b>4</b>
Ladda batteriet	4
Knapplås på/av	4
Väcka/Slå på fickminnet	4
Höj och sänk volym på högtalare	4
Höj och sänk volym i hörlurar	4
Informationslista	4
<b>Fickminne</b>	<b>5</b>
Direktinspelning	5
Spela in kortare minnesanteckning	5
Spela in kontinuerlig inspelning	5
Spela upp inspelning	5
Radera inspelning	5
<b>Milestone och datorn</b>	<b>6</b>
<b>Uppdateringar</b>	<b>6</b>
<b>Skötsel</b>	<b>6</b>

## Knappbeskrivning

### Bild och knappbeskrivning.

Text knappbeskrivning, se nedan

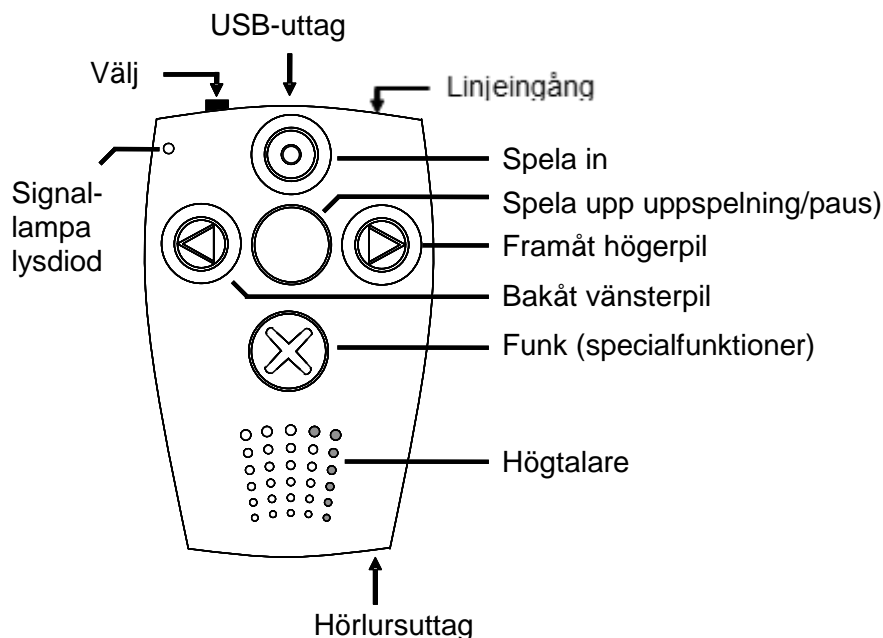

### Ovansidan

Här har du fem taktila knappar och längst ner ett högtalarraster. Knapparna sitter i tre rader, en knapp på övre raden, tre på mittraden och en knapp på nedre raden.

- Lampa: sitter längst upp till vänster.
- Översta knappen: **Spela in** och du känner en ring.
- Mittraden, där heter knapparna:
  - Vänstra knappen, heter **Bakåt** och du känner en vänsterpil.
  - Mittenknappen, heter **Spela upp** och är slät.
  - Högra knappen, heter **Framåt** och du känner en högerpil.
- Nedre knappen, heter **Funktionsknappen** (här **Funk**) och du känner ett kryss.

### Övre kortsidan

Där har du:

- Till vänster har du **Välj**.
- I mitten har du **Mini-USB-uttag**, anslutning för laddare och datorkabel.
- Till höger **linjeingång**.

## Nederkant

Till höger har du anslutning för hörlurar.

## Allmänt

Lagringsutrymmet i fickminnet är på knappt 2,5GB.  
Den går in i viloläge efter 10 minuters inaktivitet.  
Maximalt 19 timmars inspelning vid fulladdat batteri.

## Ladda batteriet

Innan användning ska du ladda batteriet ca 3 timmar.  
Det kan du göra med hjälp av den medföljande batteriladdaren eller genom att ansluta Milestone till datorn med medföljande USB-kabel för detta.

## Knapplås på/av

Tryck och håll inne **Funk** och tryck därefter på **Spela in**. Släpp knapparna, först **Spela in** och därefter **Funk**, och fickminnet bekräftar knapplås på eller av.

## Väcka/Slå på fickminnet

Det gör du genom att tryck på **Spela upp** minst en halv sekund.

## Höj och sänk volym på högtalare

Se till att ingen hörlur är ansluten. Håll ner **Funktionsknappen** och tryck **Framåt/Bakåt** för att öka och minska volym. Du hör ett pip när du nått min/maxnivå.

## Höj och sänk volym i hörlurar

Anslut hörlurar. Håll ner **Funktionsknappen** och tryck **Framåt/Bakåt** för att öka och minska volym. Du hör ett pip när du nått min/maxnivå.

## Informationslista

Genom att hålla nere **Funk** 1,5 sekunder kan du få information om aktuellt röstmeddelande, om fler foldrar är aktiverade, vart du befinner dig, ledigt utrymme, batteristatus, serienummer samt mjukvarans version.

Batteristatus meddelas på följande sätt:

Batteriet är fulladdat, laddat, ladda batteriet, ladda genast batteriet.

## Fickminne

Inspelning av röstanteckningar sker via den inbyggda mikrofonen. Den totala inspelningstiden är ca 80 timmar. Antalet meddelanden är i praktiken obegränsat.

## Direktinspelning

Du kan göra en röstanteckning direkt oavsett om fickminnet är vaken eller i viloläge. Tryck bara in **Spela in** och håll intryckt. När du hör ett kort klickljud, spela in ditt meddelande och släpp knappen när du är klar.

## Spela in kortare minnesanteckning

1. Tryck och håll in **Spela in** tills du hör ett kort klickljud. Lampan överst till vänster på ovansidan av fickminnet börjar då blinka.
2. Avsluta inspelning genom att släppa **Spela in**.

Det går bra att stoppa in ett meddelande mellan två gamla

***Obs!** Om du trycker på **Spela in** kortare än en halv sekund blir ingenting inspelat. På så vis förhindras oavsiktliga inspelningar. Vänta därför några ögonblick innan du börjar prata.*

## Spela in kontinuerlig inspelning

1. Håll ner **Spela in**.
2. Tryck **Spela upp**.
3. Du hör en signal.
4. Lampan blinkar och du spelar in.
5. Du kan göra paus i inspelningen genom att trycka **Spela upp**.
6. Lampan blinkar snabbare och du hör en dov signal.
7. Starta inspelningen igen med **Spela upp**, den dova signalen hörs.
8. Avsluta genom att trycka **Spela in** igen. Ett pipljud hörs.

## Spela upp inspelning

1. Tryck **Spela upp**.
2. Har du fler inspelningar i mappen bläddrar du till filerna med **Framåt/Bakåt**.
3. För att snabbspola i ett långt meddelande, håll nere **Framåt/Bakåt**. Efter en sekund ökar hastigheten. När du släpper återgår den till normal hastighet.

## Radera inspelning

1. Tryck **Spela upp**.
2. När du hör den inspelning som du vill radera.
3. Tryck **Funk** och **Spela upp**. Ett ljud hörs när du släpper knapparna.

## Milestone och datorn

Du kan säkerhetskopiera dina röstanteckningar från det interna minnet till datorn genom att använda medföljande USB-kabel.

1. Sätt in kabel i uttaget överst på Milestone och anslut till datorn via USB-uttag.
2. Ett fönster kommer upp på skärmen.
3. Klicka **Ok** för att **Öppna mappen för att visa filerna i Utforskaren**.
4. Du ser Milestones interna minne som **M112**. Här kan du välja de filer du vill kopiera till din dator. Du kan även lyssna på dina röstanteckningar via datorn med t ex Windows Media Player.

## Uppdateringar

Produkten har en mjukvara som styr funktionerna. Mjukvaran är under ständig utveckling för att göra ditt fickminne successivt bättre. Gå in på [www.irishjalpmedel.se/Milestone/Content](http://www.irishjalpmedel.se/Milestone/Content) och följ instruktionerna. Ta för vana att titta med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du har den senaste versionen. Uppdateringar är kostnadsfria.

## Skötsel

Rengöring ska ske regelbundet med en mjuk och lätt fuktad trasa med neutralt rengöringsmedel.

Vi önskar er lycka till med er Milestone!  
Iris Hjälpmedel

Iris Hjälpmedel AB  
S-122 33 Enskede, Besök: Sandsborgsvägen 52  
Telefon: 08-39 94 00  
[www.irishjalpmedel.se](http://www.irishjalpmedel.se)